

## DF19



**Anwendungshinweise:** Flächendesinfektionsmittel.

DF19 ist ein Universal Flächendesinfektionsmittel speziell für die Hospitalismusprophylaxe und auch universell einsetzbar. DF19 reinigt, desinfiziert und desodorisiert. Es kann auf allen wasserbeständigen Oberflächen eingesetzt werden. Typische Anwendungsgebiete sind Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Lebensmittelindustrie, Schulen, Bäder u.v.m. Seine Beschaffenheit ermöglicht es, das Produkt auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzen zu können.

Ferner eignet sich DF19 auch für die allgemeine Geruchsneutralisation – seine desinfizierende Wirkung ermöglicht es, effektive gegen geruchsverursachende Bakterien vorzugehen. Die Anwendung ist dieselbe wie bei der Flächendesinfektion.

DF19 kann 1%ig, 2%ig oder 5%ig angemischt werden und wird dann im Spray - oder Nasswischverfahren auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Die aufgetragene Lösung wird nach der jeweiligen Einwirkzeit entfernt, d.h. mit Wasser gespült.

**Einwirkzeiten:** 5 %ige Lösung: 15 Minuten  
2 %ige Lösung: 1 Stunde  
1 %ige Lösung: 4 Stunden

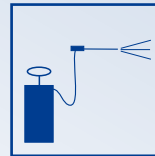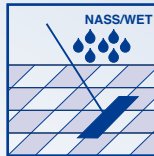

**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
pH-Wert: 8,5 - 9,5  
Dichte: 1,010 - 1,030 g/cm<sup>3</sup>

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** <5% kationische Tenside, 5 – <15% nichtionische Tenside, <5% EDTA, Duftstoffe (Cinnamaldehyd, Citronellol, d-limonene, Geraniol).

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Gerüststoffe und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Registriernummer:** N-27345

**Artikel-Nr.** 5620

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:**

R41 Gefahr ernster Augenschäden.  
R38 Reizt die Haut.  
R50 Sehr giftig für Wasserorganismen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Klasse: 9  
Klassifizierungscode: M6  
Verpackungsgruppe: III  
Gefahrzettel: 9  
UN-Nummer: 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Didecyldimethylammoniumchlorid)  
Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1  
Tunnelbeschränkungscode: E

**GISCODE:** GD30 – Desinfektionsreiniger, Basis Quats, reizend.

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**  
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland  
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*